

SciCan BRAVO G4

Autoclave de cámara



La forma más inteligente de esterilización

El esterilizador **SciCan BRAVO G4** de Clase B incorpora una fase de vacío previa a la esterilización para mejorar la penetración del vapor y una fase de vacío al terminar la esterilización para mejorar el secado. Sus opciones de 17 L y 22 L (28 L disponibles para países seleccionados), con secado a puerta cerrada asistido por vacío y tiempos de proceso eficientes, asegura a los profesionales un constante suministro de instrumentos estériles listos para su uso.



Funciones inteligentes y eficientes

Los autoclaves de cámara BRAVO G4 proporcionan tiempos de ciclo eficientes de apenas 33 minutos, incluida la esterilización y el secado de los instrumentos.

La función de arranque diferido le permite al usuario programar los ciclos, de modo que se inicien en un momento posterior.

Esta es una función eficaz para programar ciclos de prueba que comiencen antes de empezar la jornada.



Diseño flexible

El tamaño del BRAVO G4 le permite adaptarse a cualquier configuración del centro de esterilización y proporciona suficiente capacidad para satisfacer las necesidades de prácticas de cualquier tamaño. Los versátiles tamaños de cámara permiten reprocesar 5 bandejas o 3 casetes en las cámaras 17L/22L o 6 bandejas o 4 casetes en la cámara 28L**.



Agua Limpia

En el BRAVO G4 se utiliza agua desmineralizada/destilada con cada ciclo. Además, este autoclave tiene un sensor interno de conductividad de agua que monitoriza constantemente la calidad del agua y avisa si se superan los límites fijados.



Varias opciones de llenado

El autoclave BRAVO G4 ofrece numerosas opciones de llenado y drenaje: llenado manual superior y frontal, drenaje manual frontal, llenado y drenaje automático trasero. El equipamiento de agua accesorio brinda opciones para cualquier configuración del centro de esterilización.



Tecnología G4: conectividad y registro de datos

Permite liberar confiablemente la carga, documentando y almacenando los datos. Conexión a Internet para envío de datos de ciclos a la nube con fácil acceso desde dispositivos inteligentes o computadoras, para descargar los datos o bien información de mantenimiento. También dispone de un puerto USB para el registro de los datos de ciclo.

*Los tiempos de ciclo variarán según la carga de instrumentos y el voltaje.

**28L disponible solo en países seleccionados.

CICLO (120V, 60Hz[†])

	17L		22L	
	Duración del ciclo*	Carga máx.	Duración del ciclo*	Carga máx.
132°C Sólidos sin embolsar	33 mins	6 kg (13.23 lbs)	42 mins	7.5 kg (16.53 lbs)
132°C Sólidos embolsados	42 mins	6 kg (13.23 lbs)	52 mins	7.5 kg (16.53 lbs)
132°C Huecos sin embolsar	50 mins	6 kg (13.23 lbs)	63 mins	7.5 kg (16.53 lbs)
132°C Huecos embolsados	59 mins	6 kg (13.23 lbs)	73 mins	7.5 kg (16.53 lbs)
121°C Caucho y plástico	75 mins	6 kg (13.23 lbs)	89 mins	7.5 kg (16.53 lbs)

CICLO (240V, 60Hz[†])


	17L		22L	
	Duración del ciclo*	Carga máx.	Duración del ciclo*	Carga máx.
132°C Sólidos sin embolsar	27 mins	6 kg (13.23 lbs)	32 mins	7.5 kg (16.53 lbs)
132°C Sólidos embolsados	36 mins	6 kg (13.23 lbs)	42 mins	7.5 kg (16.53 lbs)
132°C Huecos sin embolsar	38 mins	6 kg (13.23 lbs)	46 mins	7.5 kg (16.53 lbs)
132°C Huecos embolsados	47 mins	6 kg (13.23 lbs)	56 mins	7.5 kg (16.53 lbs)
121°C Caucho y plástico	62 mins	6 kg (13.23 lbs)	71 mins	7.5 kg (16.53 lbs)

CICLO (230V, 50Hz[†])

	17L		22L		28L**	
	Duración del ciclo*	Carga máx.	Duración del ciclo*	Carga máx.	Duración del ciclo*	Carga máx.
134°C Universal	42 mins	6 kg (13.23 lbs)	46 mins	7.5 kg (16.53 lbs)	56 mins	9 kg (19.84 lbs)
134°C Huecos sin embolsar	35 mins	6 kg (13.23 lbs)	39 mins	7.5 kg (16.53 lbs)	44 mins	9 kg (19.84 lbs)
134°C Sólidos embolsados	33 mins	6 kg (13.23 lbs)	39 mins	7.5 kg (16.53 lbs)	45 mins	9 kg (19.84 lbs)
134°C Prion	56 mins	6 kg (13.23 lbs)	60 mins	7.5 kg (16.53 lbs)	70 mins	9 kg (19.84 lbs)
121°C Universal	58 mins	6 kg (13.23 lbs)	63 mins	7.5 kg (16.53 lbs)	69 mins	9 kg (19.84 lbs)
134°C Prueba Helix	20 mins	N/A	24 mins	N/A	24 mins	N/A

Especificaciones	17L	22L	28L**
Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto):	600mm x 480mm x 456mm (23.62" x 18.90" x 17.95")		
Volumen de la cámara de esterilización:	17 L	22 L	28 L
Volumen del depósito de agua:	5.5 L		
Peso (sin agua):	51 kg	53 kg	56 kg
Dimensiones de instalación (largo x ancho x alto):	670mm x 520mm x 470mm (26.38" x 20.47" x 18.50")		
Valor PRV (válvula de alivio de presión):	2.4 bar		
Valores eléctricos:	220V - 240V ~ 50 Hz, 10A 120V, 60 Hz, 12A 240V, 60 Hz, 10A		

*Los tiempos de ciclo variarán según la carga de instrumentos y el voltaje. **28L disponible solo en países seleccionados.

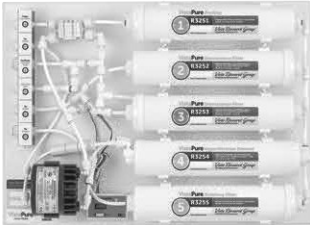

VistaPure

Filtración de agua

Proporciona dos grados de alta calidad, agua para autoclaves, botellas dentales, limpiadores ultrasónicos y el ciclo de enjuague de lavadores de instrumentos.

V3000



Monitorización ENSURE

para la esterilización con vapor

Un sistema de monitorización fácil de usar en el consultorio para la esterilización con vapor.

SCI-BISK-230EU / SCI-BISK-120

- Kit de inicio IB Ensure (25 indicadores biológicos, incubadora y libro de registro)



Indicadores biológicos (IB) ENSURE

Indicadores biológicos Ensure e indicadores autónomos para obtener resultados en apenas 24 horas. Los indicadores biológicos son el único método para asegurar el funcionamiento eficaz de su esterilizador. Los indicadores biológicos Ensure están disponibles en un sistema de kit de inicio integrado por 25 indicadores biológicos, la incubadora única y un libro de registro para fáciles anotaciones.

SCI-100BI - Indicadores biológicos (100/box)

SCI-25BI - Indicadores biológicos (25/box)



Kit de inicio ENSURE Bowie Dick

para la penetración del vapor

Diseñado para autoclaves asistidos por vacío con vapor para asegurar la penetración del vapor adecuada para un proceso de esterilización confirmado.

SCI-BDSK134V

CONTACTO: ventas@accutomex.com

52 (81) 8347-2520
Monterrey, Nuevo León.

ACCUTOMEX.COM

‡ Fabricado por:

CEFLA S.C.
Via Selice Provinciale 23/A
40026 Imola (Bo), Italy
T +39 0542 653111
F +39 0542 653344



† Fabricado para:

Dent4You AG
Bahnhofstrasse 2
CH-9435 Heerbrugg

† Distribuido por:

SciCan Ltd.
1440 Don Mills Rd.
Toronto, ON, M3B 3P9 / Canada
T +1 416 445 1600
TF +1 800 667 7733
customerservice@scican.com

Vistapure es fabricado por:
Crosstex International, Inc.
1733 W. Parkside Ln. Phoenix
AZ 85027 / USA
T +1 (800) 531-2221