


Instrucciones de instalación del protector respiratorio Keeler BIO

Ref: AX17448

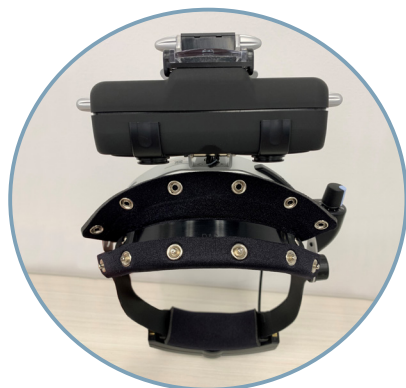

Primer Paso

Para instalar el protector respiratorio Keeler BIO, desabroche el frente del forro de espuma de la banda para la cabeza.



Segundo Paso

Una vez que los broches están expuestos, alinee los agujeros del protector de respiración con los broches de la banda para la cabeza.



Tercer Paso

Después de alinear los orificios, coloque el forro de espuma de la banda para la cabeza en la posición cerrada original.



Para obtener más información, llame al 610.353.4350 o envíe un correo electrónico a customerservice@keelerusa.com

Limpeza y desinfección del protector respiratorio Keeler BIO

La limpieza y desinfección deben realizarse de acuerdo con las indicaciones de uso del fabricante del desinfectante; así como OSHA, CDC, EPA y cualquier agencia gubernamental o industrial aplicable.

A continuación se encuentran las recomendaciones de los CDC para reprocesar la protección de la cara y los ojos, que se detallan a continuación <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/eye-protection.html>

1. Colocarse unos guantes, limpie cuidadosamente el interior, seguido del exterior del protector facial o las gafas protectoras con un paño limpio saturado con una solución de detergente neutral o una toallita limpiadora.
2. Limpie cuidadosamente el exterior del protector facial o las gafas protectoras con un paño o paño limpio saturado con solución desinfectante hospitalaria registrada por la EPA .
3. Limpie el exterior del protector facial o las gafas con agua limpia o alcohol para eliminar los residuos.
4. Seque completamente (seque al aire o use toallas absorbentes limpias).
5. Quítese los guantes y realice la higiene de sus manos.

Desinfectantes aprobados por EPA para el COVID:

<https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>

Métodos de desinfección de los CDC:

<https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/chemical.html>

Notas importantes:

- Este protector facial no es un dispositivo médico aprobado ni un equipo de protección personal bajo Keeler Ltd.
- Este protector facial está destinado a proporcionar solo una forma de protección y minimizar la transmisión de infecciones en el aire. No se garantiza la prevención de transmisiones de infecciones transmitidas por el aire como, por ejemplo, coronavirus.

Para obtener más información, llame al 610.353.4350 o envíe un correo electrónico a customerservice@keelerusa.com
